


HCP - HOFER Clavicula Pin -Extraktionsinstrument  
HCP - HOFER Clavicula Pin- Extraction Instrument


INTRAOPERATIVE HANDHABUNG  
INTRA-OPERATIVE HANDLING

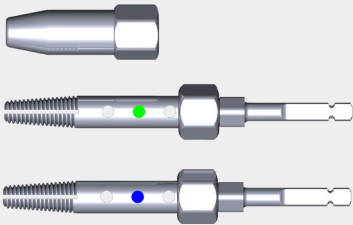


HCP Spannmutter Deluxe  
HCP Tie Nut Deluxe

HCP Spannhülse Deluxe für HCPs 2,8  
HCP Collet Deluxe for HCPs 2.8


HCP Spannhülse Deluxe für HCPd 2,8  
HCP Collet Deluxe for HCPd 2.8

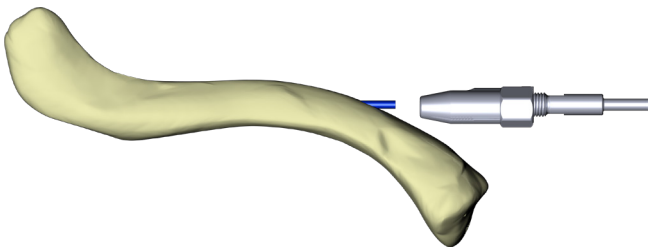


1) Instrument auf dem freien Implantatende aufsetzen  
Connect the instrument onto the free end of the pin

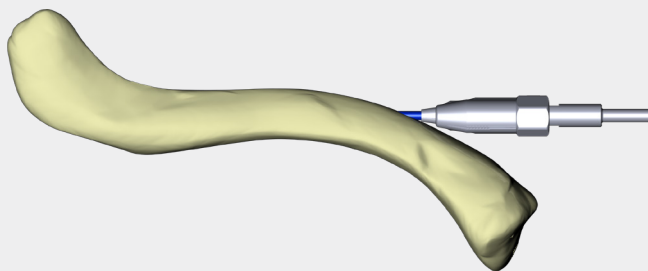

2) Spannhülse mit Gabelschlüssel (nicht dargestellt) festziehen  
Fasten the collet with the flat wrench (not shown in the picture)

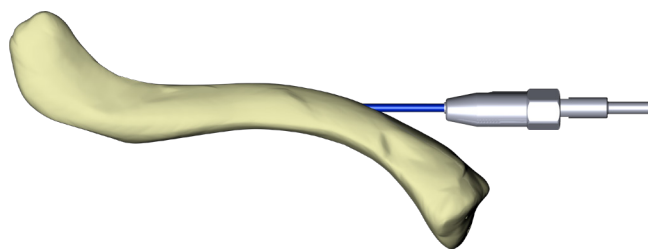

3) HCP herausdrehen: Erste Drehungen **immer vorsichtig von Hand**, gegebenenfalls Instrument nachsetzen  
Unscrew the HCP: First turns **always by hand and with caution**, if necessary adjust the instrument

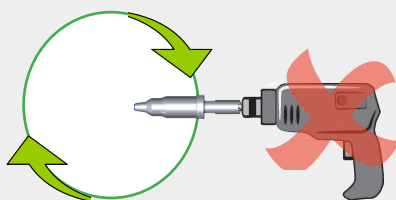

erste Drehungen bis leichtgängig/  
first turns till running smoothly

4) Sobald leichtgängig kann Bohrmaschine angesetzt werden: Langsam und gleichmäßig drehen um unnötige Hitzeentwicklung und Überbeanspruchung des Implantats zu vermeiden  
When pin shows little resistance power drill chuck can be connected: Turn constantly and not too fast to prevent unnecessary heat built-up and overstress of implant